

GAZIKI DO DEZYNFEKCJI APTEO CARE

Gaziki jałowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym (Alcohol isopropylicus)

Należy przeczytać uważnie instrukcję, nie wyrzucać instrukcji dopóki nie zostaną wykorzystane wszystkie gaziki.

Gaziki stosować ostrożnie i zgodnie z informacją znajdującą się w instrukcji użycia.

Skład: alkohol izopropylowy 1 g

Dostępne opakowania: 10 lub 100 saszetek

Saszetki zawierają jałowe gaziki, nasączone 70% alkoholem izopropylowym o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym.

Gaziki odkażające stosowane przy:

- skaleczeniach,
- zadrapaniach,
- zabiegach kosmetycznych,
- pielęgnacji pępka u niemowląt,
- pobieraniu krwi,
- iniekcji.

Sposób zastosowania gazików

Gaziki należy stosować wyłącznie zewnętrznie, miejscowo (skóra).

Przed wykonaniem wkłucia gazik należy wyjąć z saszetki i odkazić powierzchnię skóry.

Gaziki przeznaczone są do jednorazowego użycia.

Nie stosować

Nie stosować na skórę w postaci okładów.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na alkohol izopropylowy.

Nie stosować ponownie po wykorzystaniu.

UWAGA

U osób uczulonych na alkohol izopropylowy gaziki mogą spowodować podrażnienie skóry i wywoływać reakcje alergiczne. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych.

Zachować ostrożność

Unikać kontaktu gazika z okiem, gdyż alkohol izopropylowy może powodować podrażnienie oraz uszkodzenie rogówki.

Nie stosować w pobliżu otwartych źródeł ognia.

Stosowanie z lekami

Nie zaleca się stosowania gazików jednocześnie z innymi preparatami do użytku zewnętrznego, takimi jak:














- niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. salicylany lub indometacyna),
- antybiotyki do stosowania zewnętrznego (np. erytromycyna),
- chlorheksydyna,
- alkohol etylowy.

Sposób przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Wyrzucić od razu po wykorzystaniu.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

SYMBOLE UŻYTE NA OPAKOWANIU

	Użyć do
	Kod partii
	Wytwórca
	Nie używać powtórnie
	Chronić przed światłem słonecznym
	Chronić przed wilgocią
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Górny zakres temperatury
	Metoda sterylizacji: Gamma sterylizacja
	Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania
	Uwaga
	Znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie zgodności
	Autoryzowany przedstawiciel

Wytwórca:

Jiangsu Jiele Medical Dressing Co., Ltd
15, Huanxi Street, Diaopu Taizhou, Jiangsu 225 323, Chiny

Autoryzowany przedstawiciel:

Amtre Veritas Standard Technical Testing Ltd.
No.96 Holcroft Ingrave Street, London, SW11 2SQ England

Wyprodukowano dla:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa
www.synoptispharma.com

Data aktualizacji: 3.04.2014 r.