

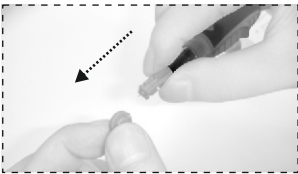


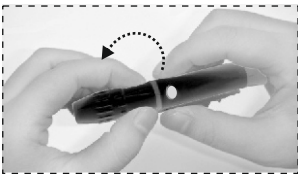
NAKŁUWACZ OPTILET MINI

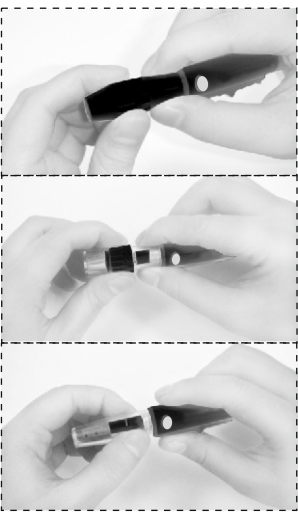
INSTRUKCJA UŻYCIA

- 

Umyj ręce mydłem i ciepłą wodą, a następnie wysusz je dokładnie. Zdejmij osłonę nakłuwacza.
- 

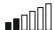



Umieść nowy lancet w nośniku.
- 

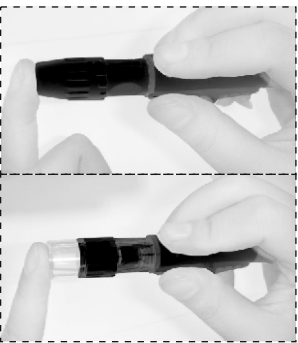
Zdejmij nasadkę ochronną z lancetu. Nie wyrzucaj tej nasadki.
- 

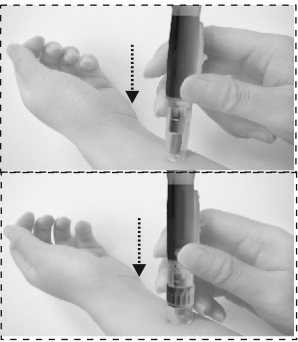
Z powrotem załóż osłonę nakłuwacza.
- 

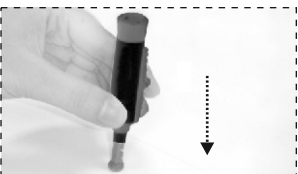
Wybierz pożądaną głębokość nakłucia, aby pozyskać odpowiednią próbkę krwi z jak najmniejszym dyskomfortem. Ustaw głębokość obracając osłonę nakłuwacza.


USTAWIENIA

 -  dla delikatnej skóry
 -  dla normalnej skóry
 -  dla grubej lub stwardniałej skóry
- 

Przytrzymaj urządzenie jedną ręką. Drugą ręką pociągnij nasuwającą tuleję do przodu aż usłyszysz kliknięcie. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. Urządzenie można przywrócić do pierwotnej pozycji zwalniając nasuwającą tuleję.
- 

Aby uzyskać wystarczającą próbkę krwi rozmasuj energicznie miejsce pobrania, a następnie umieść dłoń możliwie nisko. Przyłóż koniec urządzenia do palca, z którego ma być pobrana próbka krwi. Wciśnij przycisk, żeby wykonać nakłucie. Odłóż nakłuwacz i postępuj dalej zgodnie z instrukcją użycia Twojego glukometru.
- 

W przypadku korzystania z nasadki AST (dostępna opcjonalnie), przyłóż koniec urządzenia do ramienia, z którego pobierana będzie próbka krwi. Dociśnij, aby lekko unieść skórę w obszarze pobierania. Wciśnij przycisk, aby wykonać nakłucie. Możesz również użyć regulowanej nasadki AST montując ją na nakłuwaczu. Aby uzyskać próbkę wykonaj te same czynności.
- 

Po zakończeniu zdejmij regulowaną końcówkę. Załóż z powrotem nasadkę ochronną na odstąpięty lancet.
- 

Nigdy nie kieruj ostrza lancetu w kierunku innych osób. Wsuń dźwignię wyrzutnika do przodu, a następnie usuń lancet do odpowiedniego pojemnika. Ustaw dźwignię wyrzutnika do pozycji pierwotnej, a następnie wciśnij przycisk. Załóż z powrotem regulowaną końcówkę. Teraz nakłuwacz jest gotowy do ponownego użycia.

Czyszczenie nakłuwacza i nasadki

W celu oczyszczenia wytrzyj elementy miękką szmatką zwilżoną wodą i łagodnym detergentem. Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie. W celu dezynfekcji elementów przygotuj roztwór wybielacza domowego i wody w proporcji 1:10. Wytrzyj urządzenie miękką szmatką zwilżoną w tym roztworze. Zanurz tylko nasadkę w tym roztworze na 30 minut. Po dezynfekcji wypucz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

NAKŁUWACZ OPTILET MINI



OPTILET mini to wygodny i bezpieczny nakłuwacz z wyrzutnikiem zużytych lancetów. Służy do pobierania próbek krwi kapilarnej do badania poziomu glukozy. Dzięki regulowanej końcówce można dopasować głębokość naktucia do większości rodzajów skóry. Przed wykonaniem naktucia należy zawsze umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie je wysuszyć.



UWAGA: DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ JEDNEGO PACJENTA. To urządzenie nie może być używane do pobierania krwi przez pracowników ochrony zdrowia w placówkach opieki, klinikach i przychodniach, ani nie może być współdzielone z innymi osobami, w tym także z członkami rodziny.

NIE NALEŻY PONOWNIE UŻYWAĆ LANCETU. Użycie ponowne tej samej igły przez osoby trzecie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zagrożenia mikrobiologicznego, może nastąpić zakażenie m.in.: wirusem żółtaczkowy typu B, żółtaczkowy typu C oraz wirusem HIV.

Aby zmniejszyć ryzyko infekcji:

- Umyj miejsce naktucia wodą i mydłem przed pobraniem próbki.
- Trzymaj urządzenie w czystości.
- Zawsze używaj nowego, czystego lancetu. Lancety są jednorazowe.

Oznaczenia dla OPTILET mini



Oznaczenia dla OPTILETS



	Data ważności		Zapoznaj się z instrukcją użycia
	Wytwórca	REF	Numer katalogowy
	Data produkcji	LOT	Numer partii
STERILE R	Wyrób sterylny	Rev.	Data ostatniej aktualizacji
	Do jednorazowego użytku		Nie przeznaczony do resterylizacji
	Ilość sztuk w zestawie		Ostrzeżenie
	Nie używać przy uszkodzonym opakowaniu		

Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
Bezpłatna infolinia: 800 70 30 11
(pn.-pt. w godz. 8-16)
www.diagnosis.pl