

## Wskazówki dotyczące stosowania

Uważne przeczytanie poniższych informacji umożliwi właściwe zastosowanie HYLO-CARE® krople do oczu.

# HYLO-CARE®

Hialuronian sodu i dekspantenol

Sterylny roztwór kropli do oczu bez zawartości fosforanu i konserwantów.

Preparat przeznaczony do nawilżania i wspomagania leczenia uszkodzeń powierzchni oka powstałych np. w wyniku suchego oka lub będących następstwem zabiegów operacyjnych.

### Czym jest HYLO-CARE®?

HYLO-CARE® jest sterylnym roztworem kropli ocznych bez środków konserwujących zawierającym 1 mg/ml hialuronianu sodu, dekspantenol, bufor cytrynianowy i wodę.

### Do czego potrzebny jest HYLO-CARE®?

Do nawilżania i wspomagania leczenia uszkodzeń powierzchni oka, powstałych np. w wyniku suchego oka lub będących następstwem zabiegów operacyjnych.

### Kiedy należy stosować HYLO-CARE®?

Ciągle nawilżanie zewnętrznych struktur oczu takich jak spojówka i rogówka jest niezbędnym warunkiem do utrzymania zdrowych oczu.

Oko jest fizjologicznie nawilżane przez łzy. Zdarza się jednak, że nawilżanie staje się niewystarczające lub skład łez jest nieprawidłowy. Oko reaguje wówczas zaczerwienieniem, swędzeniem, odczuciem obecności ciała obcego, zmęczeniem. Oznaki zaburzenia wydzielania łez mogą wystąpić w suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach lub być następstwem podawania określonych leków, czy też być wynikiem starzenia się.

Komórki spojówki i rogówki ulegają ciągłemu odnawianiu. Optymalny przebieg tego procesu możliwy jest jedynie w wilgotnym środowisku. Dlatego ważnym jest, aby także po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na oku, było ono w wystarczającym stopniu nawilżane, co przyczyni się do prawidłowego przebiegu procesu gojenia.

Stosowanie kropli do oczu HYLO-CARE® przywraca stan równowagi.

HYLO-CARE® zawiera sól sodową kwasu hialuronowego, naturalną substancję występującą zarówno w oku, jak i całym organizmie człowieka. Hialuronian sodu posiada szczególne fizykalne właściwości tworzenia równomiernego, stabilnego, długo utrzymującego się na powierzchni oka filmu łzowego, który nie ulega szybkiemu zmyciu i nie upośledza widzenia.


HYLO-CARE® może być bez przeszkód stosowany w ciągu dnia. W odróżnieniu od maści, które zawierają komponenty tłuszczowe, nie zaburza on widzenia.

W skład HYLO-CARE® wchodzi również dekspantenol, substancja należąca do szerokiej grupy witamin B. Dekspantenol wspomaga skutecznie nawilżające właściwości hialuronianu sodu.

Dekspantenol posiada również właściwości wspomagania gojenia się zranień. Niewielkie powierzchniowe uszkodzenia oka powstałe na skutek upośledzenia filmu łzowego, podobnie jak te, będące wynikiem zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych na oku, szybciej się goją.


HYLO-CARE® zapewnia nie tylko wystarczające nawilżanie oka, ale powoduje również prawidłową regenerację rogówki i spojówki.

### Jak stosować HYLO-CARE®

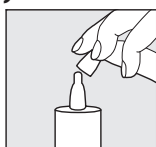

Rys. 1:


Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika.

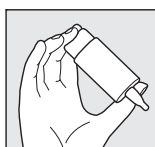

Rys. 2:

Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.

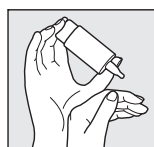


Rys. 3:

Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzymającą butelkę HYLO-CARE® na drugiej ręce.



Rys. 4:

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania **jednej** kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, **niezależnie od siły nacisku na denko**. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprzowanie roztworu po powierzchni oczu.

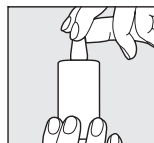

Rys. 5:

Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

Z butelki COMOD® może być pobrane 10 ml roztworu, co odpowiada około 300 kroplom.

Ze względów technicznych, po zużyciu całych 10 ml roztworu, pozostaje na dnie butelki niewielka jego ilość, ponad gwarantowaną objętość.

Należy przestrzegać zasady, że jednego opakowania preparatu używa zawsze ta sama osoba.

### Jakich innych wskazówek dotyczących stosowania należy przestrzegać?

W przypadku leczenia innymi kroplami ocznymi, należy zachować co najmniej 30 minutowy odstęp, a HYLO-CARE® powinien być zakroplony zawsze jako ostatni.

Maści oczne muszą być zawsze podawane po HYLO-CARE®.

Z uwagi na fakt, że HYLO-CARE® nie zawiera środków konserwujących jest zwykle szczególnie dobrze tolerowany.

HYLO-CARE® może być stosowany długotrwale.

W odosobnionych przypadkach stwierdzono występowanie reakcji alergicznych takich jak pieczenie, łzawienie oczu, które ustępowały po odstawieniu preparatu.

**HYLO-CARE® może być stosowany łącznie z używaniem twardych i miękkich soczewek kontaktowych.**

### Jak często i jak długo można stosować HYLO-CARE®?

HYLO-CARE® należy stosować indywidualnie według potrzeby i wskazówek okulisty lub farmaceuty.

Zwykle podaje się 3x dziennie 1 kroplę do worka spojówkowego każdego oka. W razie silniejszych dolegliwości HYLO-CARE® może być stosowany częściej. W przypadku konieczności częstszego stosowania, np. częściej jak 10 razy dziennie, należy poddać się badaniu okulistycznemu.

HYLO-CARE® przeznaczony jest do długotrwałego stosowania, jednak przy dolegliwościach utrzymujących się przez dłuższy czas (dotyczy to zresztą wszelkich schorzeń), należy zgłosić się do lekarza okulisty.

### Kiedy nie należy stosować HYLO-CARE®?

HYLO-CARE® nie powinien być stosowany w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

### Jakich wskazówek dotyczących przechowywania należy przestrzegać?

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

**Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego HYLO-CARE® może być używany przez okres 6 miesięcy.**

Nie stosować po upływie terminu ważności (☞).

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

### Dostępne opakowanie

10 ml krople do oczu

### Data opracowania ulotki

Luty 2011

### Producent (☞):

URSAPHARM  
Industriestraße  
66129 Saarbrücken  
Niemcy

